

Průběh testování dodanými AG testy

Příchod do školy se z důvodu testování se posouvá v pondělí a ve čtvrtek na **8:00**.

Testování bude probíhat v kmenové třídě vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Ochrana nosu a úst je povinná ve všech prostorách školy a školských zařízení – minimálně chirurgickou rouškou. (Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému nošení roušek, s účinností od **3. 5. 2021**. Tímto opatřením se oproti současnosti doplňuje následující: žáci nižšího stupně osmiletého gymnázia jsou při vzdělávání na gymnáziu bez ohledu na věk žáka povinni **používat jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek** (v případě žáka nad 15 let tedy **nemusí** mít při vzdělávání v těchto školách respirátor FFP2, stejné pravidlo platí i pro žáky základní školy včetně žáků 2. stupně.)

Druh testu:

SINGCLEAN (odkaz na instruktážní video <https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4>):

Přiloženou zkumavku umístěte do stojánku a připravte do ní roztok: lahvičku s reakčním roztokem otevřete ukroucením závěru, stiskněte lahvičku a do extrakční zkumavky nakapejte 6 kapek aniž byste se dotýkali okraje zkumavky.

Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:

- Zasuňte tampon do nosní dírky přibližně 2,5 cm hluboko. Přejeďte jí 5x podél sliznice nosní dírky, aby se získalo co nejvíce sekretu. Tento postup opakujte stejným tamponem i u druhé nosní dírky.
- Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.

Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:

- Vložte tampon se vzorkem do extrakční zkumavky s předem připraveným reakčním roztokem
- a otočte jej asi 10x.
- Zatlačte hlavu tampónu na stěnu zkumavky a poté nechte stát asi 1 minutu.
- Stiskněte prsty zkumavku a vytahujte tampon, aby z něj vyteklo co možná nejvíce kapaliny.
- Nainstalujte kapátko na extrakční zkumavku, pevně ji uzavřete a nechte znovu 1 minutu stát.
- Vezměte připravenou testovací kazetu, nakapejte 3 kapky odstátého reakčního roztoku se vzorkem do otvoru pro vzorek v testovací kazetě.

- Dohlížející osoba zaznamená na přiložený papír čas začátku testu a jméno žáka.
- Žák i s testem se odebere do své třídy. Test i s popisem odevzdá paní učitelce.

Vyhodnocení testu:

- Pokud je výsledek **negativní**, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše. Žákovi je umožněna účast na prezenční výuce (pokud není rozhodnuto jinak -viz "Výsledky a následní kroky").
- Pokud je výsledek **pozitivní**, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a je poslán do izolační místnosti. Následně bude kontaktován zákonný zástupce (pokud není přítomen) a žák bude odcházet ze školy. Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout.
- Pokud je výsledek **nečitelný/chybný**, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.